

WURM**CHECK**

Vielen Dank, dass Sie sich für wurmCHECK entschieden haben; zum Wohle Ihres Tieres. Schicken Sie uns die Kotprobe Ihres Tieres und wir sagen Ihnen, ob sich eine Entwurmung empfiehlt oder ob Sie auf die chemische Keule verzichten können; dank modernstem Testverfahren!

Schnell, präzise und unkompliziert:

1. Nehmen Sie mit beiliegendem Kotprobe-Röhrchen die Kotprobe Ihres Tieres.
Wir empfehlen Ihnen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils EINE erbsengrosse Kotprobe zu nehmen. Die Röhrchen-Schaufel braucht nach
2. Füllen Sie die untenstehende abziehbare Etikette mit leserlicher Schrift aus (Kugelschreiber oder wasserfester Filzstift) und kleben Sie die Etikette auf das Kotprobe-Röhrchen.
3. Legen Sie das Kotprobe-Röhrchen in die Vertiefung der Verpackung.
4. Füllen Sie das untenstehende Formular aus. Trennen Sie das Formular ab und legen Sie es in den Deckel der Verpackung.
5. Kleben Sie die vorfrankierte Rücksende-Etikette auf die Verpackung.
6. Schliessen Sie die Verpackung und kleben Sie den Deckel zu.
7. Werfen Sie das Päckli in einen Briefkasten der Schweizerischen Post.



In wenigen Tagen erhalten Sie elektronische Post von uns!

Nach Eingang der Kotprobe, erhalten Sie das Ergebnis der Analyse innerhalb von 3 Arbeitstagen. Falls nicht, bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen: 062 211 00 00 / info@microstech.com



Angaben zum Tier

Bitte füllen Sie das Formular **vollständig** aus. Das Formular muss **zwingend** mit der Probe zurückgesandt werden. Personen- und Tierdaten werden vertraulich behandelt. Auf Wunsch werden die Resultate per E-Mail an den Tierarzt weitergeleitet.

Tier

Name: _____

Art: _____

Geschlecht: _____

Besitzer

Name / Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Tierarzt

Name / Vorname: _____

Praxis: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Kotröhrchen-Etikette

Name:

Geb. Dat.:

Name Tier:

Tierart: